



---

# INSTRUCCIONES PARA LA TOMA Y ENVÍO DE MUESTRAS DE PORCINOS

El Laboratorio de Genética Animal de Bioinnova provee gratuitamente sobres impresos para la toma de muestras y la correcta identificación de los animales. Solicítelos a [muestras@geneticaanimal.com.ar](mailto:muestras@geneticaanimal.com.ar) También se encuentra disponible un modelo de sobre para imprimir y armar en [www.geneticaanimal.com.ar](http://www.geneticaanimal.com.ar)



- 
- ① Identifique al animal y complete el sobre a utilizar.
  - ② Limpie bien sus manos antes de tomar cada muestra.
  - ③ Tome 30-40 pelos de la parte posterior de la oreja.
  - ④ Enrolle el mechón en su dedo índice y tire.  
*No cortar con tijera.*
  - ⑤ Verifique la presencia de folículos en la raíz (bulbos pilosos).
  - ⑥ Colóquelo en el sobre de papel. *Guardar en lugar seco, a temperatura ambiente.*
  - ⑦ Asegúrese de mantener sus manos libres de pelos antes de tomar una nueva muestra.